




REVOMED

veterinária de confiança, diagnóstico renovado


Analizador quantitativo de imunofluorescência veterinária:

Finecare

1- Insira o chip de identificação

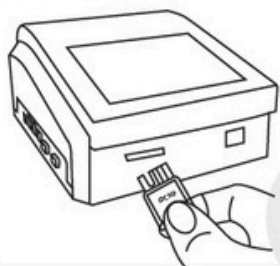

2- Clique em "Teste Standard"

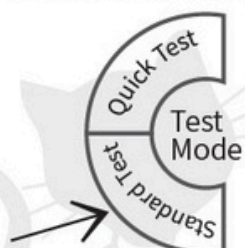

3- Amostra




4 - Coloque a amostra e
feche bem



5 - Misture bem



6 - Adicione a amostra

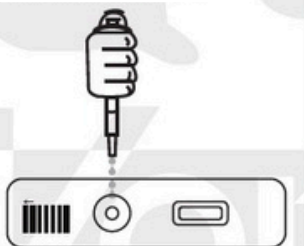

7 - Insira o cartão de
reagente



8 - Espere
pelos
resultados



Lista de métodos



Parâmetro	Volume da amostra para o buffer/tampão	Tipo da amostra	Amostra para a cassette do teste	Tempo de leitura
SDMA - Biomarcador da função Renal	10 µL	Sangue e soro	75 µL	5 min
HbA1C - Hemoglobina Veterinária A1c	10 µL	Sangue	75 µL	5 min
Canine CRP (cCRP) - Teste de Proteína C Reativa Canina (cCRP)	10 µL	Sangue e soro	75 µL	3 min
Feline SAA (fSAA) - Soro Felino Amilóide A	10 µL	Sangue e soro	75 µL	3 min
cPL - Lipase específica do pâncreas canino	75 µL	Sangue e soro	75 µL	15 min
fPL - Lipase específica do pâncreas felino	75 µL	Sangue e soro	75 µL	15 min
cCys-C - Cistatina C canina (cCys-C)	10 µL	Sangue e soro	75 µL	10 min
fCys-C - Cistatina C felina (fCys-C)	10 µL	Sangue e soro	75 µL	10 min
cNT-proBNP	75 µL	Sangue e soro	75 µL	10 min
fNT-proBNP	75 µL	Sangue e soro	75 µL	10 min
CCV Ag - Antígeno de Coronavírus Canino	10 µL	Sangue e soro	75 µL	10 min
CPV Ag - Antígeno de Parvovírus Canino	Fezes		75 µL	10 min
CDV Ag - Antígeno Vírus da esgana canina	Secreções		75 µL	10 min
FCoV Ag - Coronavírus felino	Fezes		75 µL	10 min
FPLV Ag - Parvovírus felino	Fezes		75 µL	10 min
ICH Ab - Hepatite infecciosa canina IgG	10 µL	Sangue e soro	75 µL	10 min
CPV Ab - Parvovírus canino IgG	10 µL	Sangue e soro	75 µL	10 min
CDV Ab - Vírus da esgana canina IgG	10 µL	Sangue e soro	75 µL	10 min
FCV Ab - Feline Calicivirus IgG	10 µL	Sangue e soro	75 µL	15 min
FPLV Ab - Vírus da Panleucopenia Felina IgG	10 µL	Sangue e soro	75 µL	10 min
FHV Ab - Vírus do herpes felino IgG	10 µL	Sangue e soro	75 µL	10 min
T4 - Tiroxina veterinária	75 µL	Sangue e soro	75 µL	15 min
TSH - Hormônio Estimulador da Tireóide veterinária	75 µL	Sangue e soro	75 µL	15 min
Canine Prog (cProg) - Progesterona Canina	75 µL	Sangue e soro	75 µL	15 min
Cortisol (COR) - Cortisol veterinário	75 µL	Sangue e soro	75 µL	15 min
D-Dimer - D-dímero veterinário	10 µL	Sangue e plasma	75 µL	15 min